	<b>วิธีปฏิบัติงาน</b>	รหัสเอกสาร : WI - IC - 006	
	หัวข้อ : การปฏิบัติในการรับ - ส่ง การดูแลจัดการเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปราศจากเชื้อ	R 01	วันที่ใช้ : 21/06/64
		หน้าที่ : 1 / 2	

## ๑. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการรับ - ส่ง และการดูแลเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปราศจากเชื้อ

## ๒. เป้าหมาย

หน่วยงานไร้เชื้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามแนวทางการรับ - ส่ง และการดูแลเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปราศจากเชื้อได้อย่างถูกต้อง

## ๓. ผู้รับผิดชอบ

๑. หน่วยงานไร้เชื้อ
๒. หน่วยงานที่ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์


## ๔. คำจำกัดความ -

## ๕. แนวทางปฏิบัติ

๑. หลังการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยนำเครื่องมือไปทำความสะอาดโดยล้างผ่านน้ำก่อนแช่ลงในภาชนะที่บรรจุน้ำ ที่ห้องล้างเครื่องมือแผนกทันตกรรม ก่อนที่จะส่งหน่วยงานไร้เชื้อ เพื่อป้องกันไม่ให้คราบเลือด , สารน้ำจากร่างกายผู้ป่วยแห้งกรัง จะทำให้ทำความสะอาดยาก
๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วย ควรสวมเสื้อคลุม หมวก mask ถุงมือยางหนา และแว่นตา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเลือดหรือสารน้ำจากร่างกายผู้ป่วยที่ยังไม่ผ่านการทำลายเชื้อกระเด็นเข้าทางเยื่อเมือกหรือเข้าทางบาดแผล
๓. การยกและเคลื่อนย้ายเครื่องมือระหว่างนำไปล้างภายใต้ภาชนะที่มีฝาปิดและควรกระทำด้วยความนุ่มนวล จัดวางของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อป้องกันการชำรุดและอุบัติเหตุเครื่องมือที่มแทงผู้ปฏิบัติงาน
๔. ในการมาส่งของที่นึ่งที่หน่วยไร้เชื้อ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจ check ของที่มาส่งให้ตรงตามจำนวน และรายการที่ระบุไว้ในแบบรับ - ส่งของนึ่ง กรณีที่ของไม่ครบให้แจ้งหัวหน้างาน และบันทึกไว้ในแบบรับ - ส่งของนึ่ง ที่มาส่งประจำวันว่าขาดอะไรและจะได้รับเมื่อใด กรณีเป็นเครื่องมือที่ต้องทำให้ปราศจากเชื้อ
๕. กรณีของที่นึ่งแล้วไม่ได้ผ่านการใช้งานให้ส่ง Re-sterile ดังนี้
  - ๕.๑ ของที่ทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบไอน้ำโดยห่อด้วยผ้าให้ส่ง Re - sterile ทุกวันที่ ๓๐
  - ๕.๒ ของที่ทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบไอน้ำโดยบรรจุในซองพลาสติกขึ้นให้ส่ง Re - sterile ทุก ๖ เดือน
๖. การรับของนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ห้องไร้เชื้อเป็นผู้รับผิดชอบ นำส่งทุกวันราชการ เวลา ๑๔๐๐ - ๑๕๐๐ น

## การจัดเก็บ

๑. ใช้เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
๒. เครื่องมือที่ใช้ซ้ำต้องทำความสะอาด และเครื่องมือที่ปราศจาก เชื้อต้องผ่านการนึ่งไอน้ำภายใต้ความดันทุกชิ้น ( แขนงเครื่องมือในน้ำยาเอนไซม์ )
๓. เครื่องมือที่ทำการปราศจากเชื้อผ่านเกณฑ์มาตรฐาน \* ผ้าห่อเครื่องมือไม่ขาด ไม่มีรู \* ซองซีลปิดสนิท \*

	<b>วิธีปฏิบัติงาน</b>	รหัสเอกสาร : WI - IC - 006	
	หัวข้อ : การปฏิบัติในการรับ - ส่ง การดูแลจัดการเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปราศจากเชื้อ	R 01	วันที่ใช้ : 21/06/64
		หน้าที่ : 2 / 2	

**\*ตัวบ่งชี้ทางเคมีภายนอกเปลี่ยนเป็นสีดำสนิท ทั้งแถบ ๓ ชีต (อย่างน้อยมี ๓ แถบ)**

๔. ใช้ก๊อชและสำลีแบบ single use
๕. ใช้ ๗๐ % Alcohol pad
๖. แยกเครื่องมือผู้ป่วยทั่วไป กับผู้ป่วยติดเชื้อ
๗. รวบรวมและนำส่งเครื่องมือปนเปื้อนด้วยภาชนะที่ปิดมิดชิด ไปล้างที่บริเวณแยกล้างของปนเปื้อน
๘. ขนส่งเครื่องมือที่ผ่านการทำลายเชื้อแล้วด้วยภาชนะที่สะอาด ปิดมิดชิด
๙. First In First Out
๑๐. ไม่มีเครื่องมือแพทย์หมดอายุ
๑๑. ล้างมือก่อนจับห่ออุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อ
๑๒. หยิบห่ออุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ห่ออุปกรณ์ตก
๑๓. เก็บในตู้ที่ปิดมิดชิด
๑๔. จัดเตรียมขวด Alcohol hand rub ตั้งบริเวณตู้เก็บของปราศจากเชื้อ
๑๕. ตู้เก็บของปราศจากเชื้อควรเป็นตู้ที่สามารถทำความสะอาดง่าย
๑๖. ตู้เก็บของปราศจากเชื้อต้องปิดมิดชิดตลอดเวลา
๑๗. ตู้เก็บของปราศจากเชื้ออยู่สูงจากพื้น ๘ - ๑๐ นิ้ว ห่างจากเพดาน ๕ นิ้ว เว้นแต่ใกล้ Sprinkle ต้องห่าง ๑๘ นิ้ว และห่างจากกำแพง ๒ นิ้ว
๑๘. ตู้เก็บของอุปกรณ์ต่างๆ และของ Sterile ไม่อยู่ใต้ หรือใกล้อ่างน้ำ
๑๙. ตู้เก็บของปราศจากเชื้อต้องอยู่ในบริเวณที่ไม่มีคนพลุกพล่าน ไม่มีลมพัดผ่าน
๒๐. ตู้เก็บของปราศจากเชื้อควรมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ๑๘ - ๒๒ องศา
๒๑. ไม่ใช้หนังยาง Clip และ Max ในการจัดรวมห่ออุปกรณ์ปราศจากเชื้อเข้าไว้ด้วยกัน
๒๒. ก่อนหยิบจับอุปกรณ์ปราศจากเชื้อควรล้างมือด้วยสบู่เหลว หรือ Alcohol Hand rub
๒๓. มีการบันทึกตรวจสอบวันหมดอายุของห่ออุปกรณ์ปราศจากเชื้อ

#### **๖. เครื่องชี้วัดคุณภาพ**

รายงานความเสี่ยงการไม่ปฏิบัติตามแนวทางการรับ - ส่ง และการดูแลจัดการเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปราศจากเชื้อ