



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รหัสเอกสาร : PM -MSS - 001

หัวข้อ : การให้บริการของ แผนกเวชภัณฑ์ไร้เชื้อ

R 03 วันที่ใช้ : 12/02/61

หน้าที่ : 1/2

1. วัตถุประสงค์

- 1.1. เพื่อเป็นแนวทางในการ รับ - จ่าย ของนึ่งฆ่าเชื้อ
- 1.2. เพื่อการนึ่งฆ่าเชื้อและการบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อให้มีประสิทธิภาพ

2. ขอบข่าย

- 2.1. รับ - สิ่งอุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์ที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อ
- 2.2. จ่าย - สิ่งอุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์ที่ทำให้ปราศจากเชื้อเรียบร้อยแล้ว


3. นิยาม -

4. ผู้รับผิดชอบ

- 4.1. หน.แผนกเวชภัณฑ์ไร้เชื้อ มีหน้าที่ ควบคุม กำกับ ดูแล สั่งการ
- 4.2. พยาบาล รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย หรือ หน.แผนกสั่งการ
- 4.3. พนักงาน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย หรือ หน.แผนกสั่งการ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้บริการของแผนกเวชภัณฑ์ไร้เชื้อ

- 5.1. รับอุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์จากหน่วยต่าง ๆ ใน รพ.ฯ ที่ได้รับการล้าง ห่อ ให้เรียบร้อยแล้ว มาส่งที่แผนกเวชภัณฑ์ไร้เชื้อ จนท.แผนกเวชภัณฑ์ไร้เชื้อ บันทึกข้อมูลการนำส่งลงในสมุด รับ-จ่าย ของนึ่ง โดยกำหนดช่องทางการ ส่ง-รับ ของนึ่งแยกจากกัน (ONE WAY)
- 5.2. การตรวจสอบและคัดแยกประเภทของนึ่ง เช่น เครื่องมือ เครื่องแก้ว ฯลฯ เพื่อสะดวกในการจัดวาง และแยกนึ่ง ห่อของนึ่งต้องสะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อย มีเทปทดสอบทางเคมีติดที่ห่อ และต้องระบุรายละเอียดบนห่อของนึ่ง ดังนี้
 - 5.2.1 ชื่อ Set
 - 5.2.2 ว.ด.ป. ที่ส่งนึ่ง
 - 5.2.3 ว.ด.ป. ที่หมดอายุ
 - 5.2.4 ชื่อหน่วย
 - 5.2.5 ชื่อผู้จัดเตรียม
- 5.3. การนึ่งฆ่าเชื้อโรค เป็นการดำเนินการตามเทคนิคและขั้นตอนการทำลายเชื้อของเครื่องนึ่ง ตลอดจนการบำรุงรักษาเครื่องนึ่ง ตามการนึ่งฆ่าเชื้อและการบำรุงรักษาเครื่องนึ่ง (WI - MSS - 001)
- 5.4. การตรวจสอบ คัดแยกและจัดวางของนึ่งในที่กำหนด
 - 5.4.1 ห่อของนึ่งอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่หลุดลุ่ย กรณีถ้าพบห่อของนึ่งหลุดลุ่ย ไม่ให้จ่ายของกลับ แต่ให้แยกเตรียมนึ่งใหม่อีกครั้ง
 - 5.4.2 Autoclave Tape ขึ้นแถบสีดำ ถ้าแถบไม่ขึ้นสีดำหรือขึ้นไม่ชัดเจน ให้แยกเตรียมนึ่งใหม่
 - 5.4.3 ถ้าสงสัยว่าห่อของนึ่ง Contaminate อาจสังเกตได้จากการห่อไม่มิดชิด ผ้าเปียกชื้น ตกลงพื้น ให้ถือว่า Contaminate ให้แยกเตรียมนึ่งใหม่
 - 5.4.4 คัดแยกห่อของนึ่งของแต่ละหน่วย จัดวางในที่กำหนด
- 5.5. การจ่ายห่อของนึ่ง จนท.แผนกเวชภัณฑ์ไร้เชื้อ จะตรวจดูรายการบัญชีที่ลงทะเบียนรับไว้ และนำส่งตรงตามหน่วยในสมุด รับ - จ่าย ห่ออุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ และผู้รับของนึ่งลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร : PM -MSS - 001	
	หัวข้อ : การให้บริการของ แผนกเวชภัณฑ์ไร้เชื้อ	R 03	วันที่ใช้ : 12/02/61
		หน้าที่ : 2/2	

6. เอกสารอ้างอิง

6.1. วิธีการนึ่งฆ่าเชื้อและวิธีการบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (WI – MSS - 001)

7. บันทึก

7.1 สมุดรับ - จ่ายของนึ่ง

8. เอกสารที่แนบ

8.1 Flow Chart การรับ - จ่ายของนึ่งฆ่าเชื้อโรค

8.2 ตัวอย่าง Autoclave tape

- ใช้ได้ (OK)

- ไม่ได้

- ไม่ได้

- ไม่ได้